

FM補聴システム

～すこし離れた場所にいるお子様へ、ママの声を直接届けるシステム～



ママの声、しっかり聞いてね。



FM送信機



FM受信機

※補聴器は含まれません

FM補聴システムは、聞き取りが難しい環境でも、より豊かで正確なコミュニケーションをサポートし、お子様のことばやコミュニケーション力を育みます。

まわりが騒がしかったり、お子様との距離が離れていると、補聴器をつけていても十分な聞き取りが難しいことがあります。FM補聴システムは、マイクロホンに入る声をFM電波に変え、まるですぐそばで話しているように、距離やまわりの騒音からの影響が少なく、クリアな音声をお子様へ届けることができます。


感度とチャンネルは
スイッチ操作で切り替え可能
(プリセット*機能付き)

受信機と補聴器は
一体接続

LEDランプで
動作確認が可能

*設定値を保存

FM補聴システムのしくみ

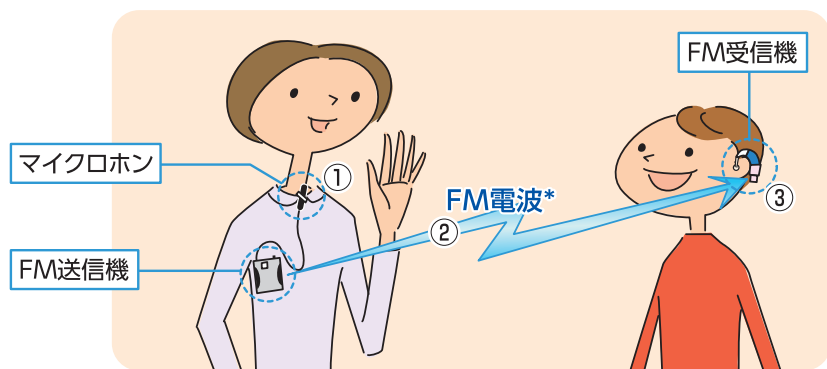


* 到達可能距離 約20m(障害物がない場合)

- ① マイクロホンで声を受け取ります。
- ② マイクロホンから入った声を、FM送信機から送信します。
- ③ お子様が発用した補聴器に接続されたFM受信機が受信します。

シンプルなボタンと簡単な操作


FM送信機とFM受信機には電源ランプや状態表示ランプによる表示機能が搭載されており、動作状態を確認することができます。また、FM受信機はスイッチ動作をプリセット(設定値を保存)しておくことで、音量切り替えやチャンネル切り替え操作をカスタマイズすることができます。

FM送信機

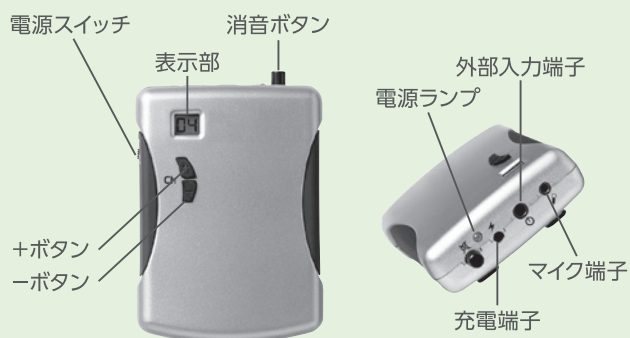

FM受信機 ※補聴器は含まれません

オーディオシュー

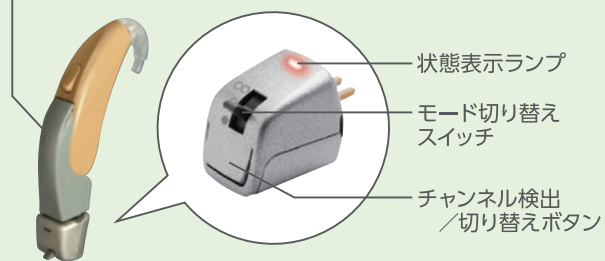

- ※ それぞれのスイッチ動作はプリセットすることができます。
- ※ オーディオシューはご利用の補聴器に適合するものをお使いください。
- ※ オーディオシューの適合に関する詳細は、補聴器販売店にお問い合わせください。

主な仕様

	169MHz帯FM送信機	169MHz帯FM受信機
大きさ	約59×82×21mm	約14×11×12mm
重さ	約55g(電池含まず)	約1.6g
電源	専用単四充電電池2本(本体内で充電)	補聴器から供給
アンテナ	マイクロホンコード兼用タイプ	—
外部入力端子	φ3.5ジャック	—
出力端子	—	オーディオシューで補聴器に接続
チャンネル	M01～M16までの中で1～5チャンネルを選択し、プリセット可能	—
チャンネル表示	液晶による数字表示	LEDによる受信状態表示
ボリューム表示	液晶による数字表示	—

※ 本仕様は改良のためお断りなく変更することがあります。

この製品は無償貸与です。但し、送料¥2,000/台はご負担ください。

公益財団法人 聴覚障害者教育福祉協会

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-43-11 福祉財団ビル5F
TEL.03-6907-2537 FAX.03-6907-2915

販売元  リオン株式会社
www.rion.co.jp

2019 6 R